

Gebrauchsanweisung Positionierungshilfen

(Stand 19.02.2013)

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung einer Positionierungshilfe genau durch und beachten Sie die notwendigen Informationen zur sicheren Anwendung. Technische Informationen und diese Gebrauchsanweisung zu den gelieferten Produkten finden Sie im Lieferschein und auf unserer Internetseite www.wulff-med.de. **Aufbau:** Die VISKOLASTIC® Positionierungshilfen bestehen aus einem viskoelastischen Polyurethanschaum sowie, wenn es der jeweilige Einsatzbereich erfordert, einer Stüttschicht aus Polyätherschaum. · PURLASTIC Positionierungshilfen bestehen aus Polyätherschaum. **Zweckbestimmung: Einsatzbereiche (Indikation)** VISKOLASTIC® Positionierungshilfen sind als druckverteilende Hilfsmittel zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bei Dekubitus gefährdeten zu Pflegenden, VISKOLASTIC® und PURLASTIC Positionierungshilfen als Hilfsmittel für die druckentlastende, therapeutische, atemtherapeutische und kontrakturprophylaktische Positionsunterstützung einsetzbar. · Durch den desinfizierbaren PERLASTIC® soft Silber Vollsenschutzbezug (Ausnahme sind Schaumstoffplatten und Positionierungshilfen für Brandverletzte) unterstützen unsere Positionierungshilfen bei der Vermeidung von Crossinfektionen. · Der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) ist zu beachten. **Ausschlusskriterien und Kontraindikationen** Ausschlusskriterien für den Einsatz der VISKOLASTIC® und PURLASTIC Positionierungshilfen sind keine bekannt. **Anwendungshinweise** Eine Produktvorbereitung vor Verwendung neuer Positionierungshilfen ist nicht erforderlich. Bereits verwendete Matratzen sind wie unter Aufbereitung/Wartung angegeben aufzubereiten und auf Beschädigungen zu überprüfen. · Vermeiden Sie bei Anwendung und Aufbereitung eine Beschädigung des Schutzbezugs durch scharfe Gegenstände wie Messer und Nadeln sowie aggressive chemische Substanzen wie Natronlauge und Farbstoffentferner. **Aufbereitung/Wartung:** Die VISKOLASTIC® und PURLASTIC Positionierungshilfen sind, ausgenommen Schaumstoffplatten und Positionierungshilfen für Brandverletzte, mit einem PERLASTIC® soft Silber Vollsenschutzbezug ausgestattet und für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz, z.B. bei einem Patientenwechsel, ist die Positionierungshilfe mit dem PERLASTIC® soft Silber Vollsenschutzbezug entsprechend den Richtlinien des RKI hygienisch aufzuarbeiten und gemäß MPBetreibV auf Beschädigungen zu prüfen. Die Aufbereitungshinweise im Technischen Datenblatt sowie auf der Bedruckung des Schutzbezugs und dem Seidenetikett des Schaumstoffkerns sind hierbei zu beachten. · PERLASTIC® soft Silber Schutzbezüge können durch Abwischen mit einem mit dem entsprechenden Desinfektionsmittel getränkten Tuch desinfiziert oder bei 95 °C chemothermisch aufbereitet werden. Das Trocknen kann bei niedriger Temperatur (bis 60 °C) erfolgen. · Eine Aufbereitung der gesamten Einheit aus Schaumstoffkern und Schutzbezug in der VDV-Kammer ist bei 75 °C möglich. · Positionierungshilfen aus Polyätherschaum und deren Schutzbezüge können bei 105 °C in der VDV-Kammer aufbereitet werden. Wir empfehlen jedoch auch hier 75 °C, da sie das Material schonen. · PERLASTIC® soft Silber Schutzbezüge dürfen nicht gemangelt werden, da Lufteinschlüsse die Beschichtung des Bezugstoffes beschädigen können. · Das Bezugsmaterial darf nicht gebürstet oder mit abrasiven Lappen bzw. Schwämmen bearbeitet werden. · Beschädigte Schutzbezüge sind gemäß MPBetreibV auszutauschen. Der entsprechende Schaumstoffkern muss thermisch aufbereitet oder, bei groben Verschmutzungen und/oder Beschädigungen, ebenfalls entsorgt werden. · Wird ein Schutzbezug ersetzt, ist auf das richtige Beziehen der Positionierungshilfe zu achten. **Lieferumfang:** wenn im Lieferschein nicht anders angegeben 1 VISKOLASTIC® bzw. PURLASTIC Schaumstoffkern, 1 PERLASTIC® soft Silber Vollschutzbezug · Die Gebrauchsanweisung finden Sie bei den Technischen Daten des jeweiligen Produktes unter www.wulff-med.de. **Warnhinweise:** Reinigung und Desinfektion der Positionierungshilfen vor einem Wiedereinsatz bzw. bei Patientenwechsel entsprechend den unter Aufbereitung/Wartung angegebenen Daten. · Durch Beschädigungen (z.B. Risse) ist die Funktion des PERLASTIC® soft Silber Vollschutzbezugs zur Vermeidung von Crossinfektionen nicht mehr sichergestellt. · Der Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege vom Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) ist zu beachten.